

## Procedura di installazione della versione di prova gratuita (durata 30 giorni)


Iniziare ad usare EasyDentalScan richiede quattro semplici passi:

- 1- avvia il Download cliccando sul link che hai ricevuto nella tua casella email
- 2- installa EasyDentalScan
- 3- segui la procedura guidata che si avvierà con l'installazione
- 4- ad installazione ultimata avvia il software appena installato
- 5- appena il software verrà avviato deve essere esegui la CALIBRAZIONE

### CALIBRAZIONE


È la fase di configurazione iniziale di EasyDentalScan che consentirà al software installato di adattarsi nel modo più preciso alle caratteristiche dello scanner utilizzato e di portarne al massimo le prestazioni.

**WARNING:** prima di iniziare la calibrazione assicurarsi che lo scanner sia Acceso!

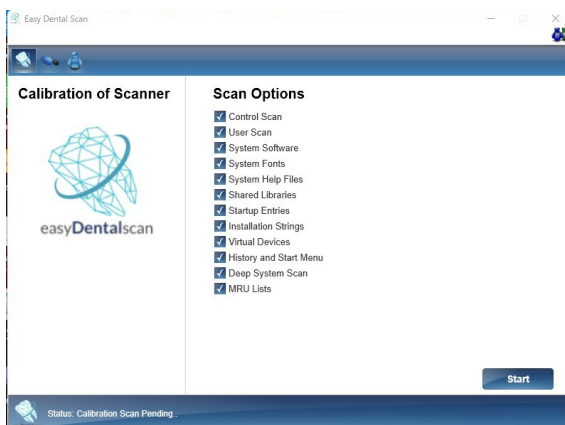


Attendere l'apertura della finestra e premere Start per avviare la scansione

---

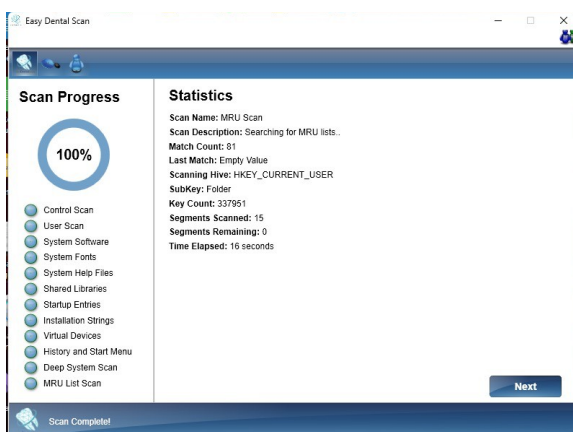


Al termine del processo di scansione premere Next

---

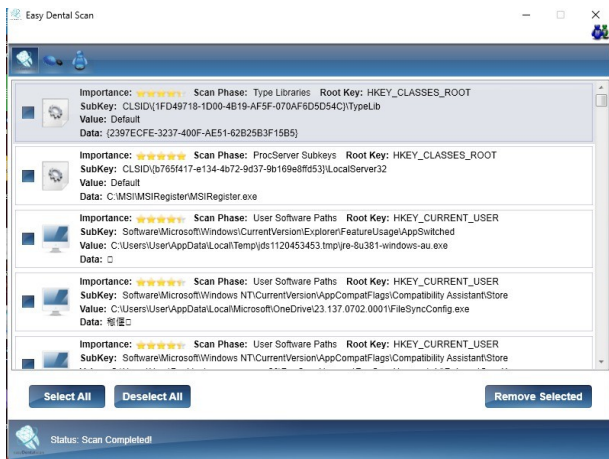

Al termine della scansione si presenterà la finestra qui sopra: premere in successione il **tasto Select All** ed il **tasto Remove Selected**

---

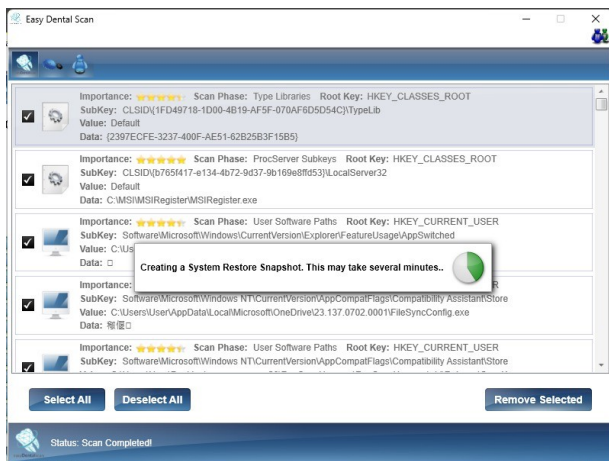

Attendere la creazione del punto di ripristino con la configurazione della Calibrazione

---

Il processo è completato e si può iniziare ad usare lo scanner.